

カタログ見本

ミカンが、現場で必要とされる
スムーズで低リスクな吸引作業を実現します。

壁かけ式ディスポ吸引器

yoex S-801 **DISPO** mikan
ヨックスディスポ ミカン

▶患者さんの安全にも配慮した スムーズなライナー交換

ライナーをキャニスタに差し込み、キャニスタを閉じればセット完了。あらかじめライナーの中に凝固剤がセットされているので、後処理や交換の際の手間が大幅に省けます。ライナー交換の操作は、キャニスタが下がり、ライナーを手前に引き上げる構造を採用。

ライナー交換時の高さは床から約130cm。そのため、背の低い方でも、背伸びすることなく、スムーズに交換することができます。斜めにライナーを引き上げるので、吸引器がアウトレットから外れにくい力の方向となり落下リスクも低減します。また、SLIDEボタンを押しながらキャニスタを手前にスライドさせれば、コントローラからの取り外しができるため、卓上でのライナー交換も可能です。



約130cm



▶環境感染対策にこだわった部品構成

排液は凝固剤によってゲル化します。排液を直接触れることがないので、排液処理の際の接触感染リスクを低減します。また、キャニスタ、キャニスタホルダー、調整ハンドルカバー、ホースハンガーを取り外すことができ、ウォッシャー・ディスポインフェクター等での洗浄・消毒が可能です。



▶確実な吸引手技の実現

吸引性能をこれまでの吸引器よりも大きく向上させたことで、気管吸引のガイドラインで推奨される、吸引圧力設定-20kPaでもしっかり吸引できます。また、カテーテルの閉塞なく、最大吸引圧が設定できるゲージレスコントローラーを採用しているので、安全・確実な吸引が可能です。



看護さん、環境、そして患者さん。

大切な三つの“カン”のために開発された壁掛け式吸引器、それがヨックスディスポ ミカンです。

痰などの分泌物を効果的に吸い出す優れた吸引性能はもちろん、

分解洗浄が可能なつくりや交換しやすいライナーなど、

使う方の身になって考えた機能や使い勝手を備え、医療や介護の現場で働く方々を堅実にサポートします。