

DAIKIN



ライトテック
LiteTEC
Safety & Life TECHNOLOGY

酸素濃縮装置

ライトテック-5A

医療機器認証番号:228AHBZX00023000



安心、使いやすさを追い求め
ダイキンから
患者さまのために



安心
機能

簡単
操作


音声
ガイダンス

5A

安心機能

ポンベ自動切替機能 (搭載機のみ機能)

- 万一の停電時、自動的に酸素供給をポンベに切替。酸素の供給を維持します。ポンベの残圧がない場合は、音声でお知らせします。

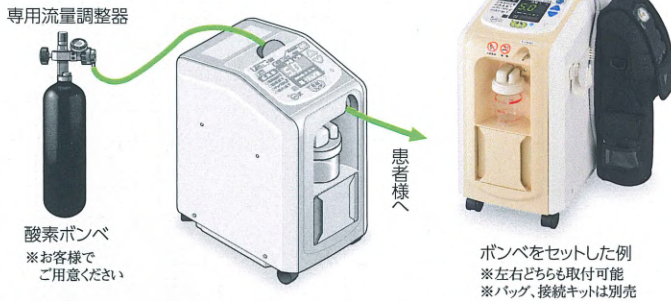

● おおよそのポンベからの酸素供給時間

ポンベサイズ	充てん圧	設定流量 (L/分)				
		1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
2.0 L	19.6 MPa	300分	150分	100分	70分	60分

火災検知機能

- 機器に火が入る前に、素早く酸素の供給を停止します。

加湿器の有無の選択可能

- 流量設定は0.25L/分の低流量まで対応します。また、低流量時は加湿器なしでの使用も可能になりました。

仕様

販売名	ライトテック-5A	電源	定格 AC100V 50/60Hz
医療機器認証番号	228AHBZX00023000	電源入力	410VA
分類	管理医療機器・特定保守管理医療機器	電撃保護	クラスII機器、B形装着部
流量設定 (L/分)	0.25、0.5、0.75、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0	EMC	JIS T 0601-1-2:2012に適合
酸素濃度	全設定流量90% (-3%/+6%)	警報機能	電源確認、濃度低下、流れ低下、チューブ折れ、異常(圧力、コンプレッサー、酸素センサー、高温、火災検知)
消費電力	1L/分 80W、3L/分 120W、5L/分 195W	使用条件	室内温度5~35℃ 相対湿度30~75%(結露なきこと) 使用気圧範囲 900hPa以上(標高1000mまで)
運転音	1L/分 26dB(A)、3L/分 30dB(A)、5L/分 32dB(A) ※無響室:正面1m、高さ30cmにおいて	JANコード	ポンベ自動切替機能有り: 4906938960804 ポンベ自動切替機能なし: 4906938960811
質量	20kg		
寸法	高さ53cm×幅27cm×奥行44cm		

■ 本製品の仕様は性能向上のため、予告なしに変更する場合があります。

簡単操作

- シンプルでわかりやすい操作とアラーム内容がすぐわかる表示をパネルに採用しました。

アラーム内容を表示

処方流量をセットしておけばこのボタンで簡単切替



ロック機能で誤操作防止

手で流量を細かく変更する際はこのボタン

音声ガイダンス

- 操作内容や各種警報を様々な音声ガイダンスでわかりやすくお知らせします。

周囲に火の気がないことを確認してください。



製造販売業者

ダイキン工業株式会社

本社 〒530-8323
大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
特機事業部 〒566-8585
大阪府摂津市西一津屋1番1号