

コピー禁止

使用可能時間早見表

使用可能時間が30分以下

使用可能時間が30~45分間

使用可能時間が60分以下  
(太枠内/単位:分)

内容積 3.4L	酸素流量(単位: L/分)	ポンベの圧力 (単位: MPa)									
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
医療用酸素	0.5	762	707	653	598	544	490	435	381	326	272
	1	381	354	326	299	272	245	218	190	163	136
	2	190	177	163	150	136	122	109	95	82	68
	3	127	118	109	100	91	82	73	63	54	45
	4	95	88	82	75	68	61	54	48	41	34
	5	76	71	65	60	54	49	44	38	33	27
	6	63	59	54	50	45	41	36	32	27	23
	7	54	51	47	43	39	35	31	27	23	19
	8	48	44	41	37	34	31	27	24	20	17
	9	42	39	36	33	30	27	24	21	18	15
10	38	35	33	30	27	24	22	19	16	14	

※安全係数0.8をかけて算出

お客様用にカードタイプをご用意しております

ポンベ容積3.4L、ガス容量500L容器の場合

取扱注意事項

※酸素ポンベの色は黒

コピー禁止

- ▲ ポンベのガス名・ラベルを確認
- ▲ 容器を倒さない(カート・台車を使用)
- ▲ 火気・油脂厳禁
- ▲ ガス漏れ等の異常を確認
- ▲ バルブの開閉はゆっくり
- ▲ 40℃以下に保ち保管

指示値 5(MPa) 残量 約170L 交換目安

指示値 10(MPa) 残量 約340L

指示値 2~3(MPa) 残量 約70L 交換目安

指示値 15(MPa) 残量 約500L

MPa OXYGEN USE NO OIL

V3.4

酸素残量(使用可能量) =  $\frac{\text{ポンベ内容積}(V) \times \text{圧力計の値}}{\times 10 \times \text{安全係数}0.8}$

使用可能時間(分) =  $\frac{\text{酸素残量(使用可能量)}}{\div \text{指示流量}}$

株式会社 世田谷酸素商事  
本社 ☎ 03-3417-1166