

参考

# ヨックスディスポ S711

製造販売元  
株式会社群馬コイケ

すばやく、かんたん、清潔 固めて処理するディスポ吸引器



届出番号	10B2X00014C00011
一般の名称	真空吸引器
クラス分類	・一般医療機器 ・特定保守管理医療機器


## ■ 製品仕様

容量	1,200mL	500mL
入口吸引圧力	-60～-80kPa	
吸引圧力調整範囲	0～-60kPa	
吸引圧力調整目盛	OFF、-5、-10、-15、-20、-25、 -30、-35、-40、-45、-50、-55、 -60 (kPa)	
寸法	W136× D198× H327mm	W136× D198× H242mm
重量	1,130g	1,030g

## 参考

# ヨックスディスポ S711

### 片手で簡単着脱

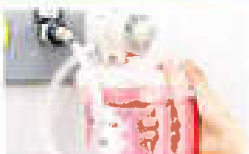

グリップを握り、親指でカラーボタンを押しながらキャニスターを手前にスライドさせれば、外れます。セット時はスライドさせて押し込むだけです。

### キャニスターは清潔で安全



吸引された排液は直ちに凝固剤によって固められます。排液に直接触れる事がないので汚染の心配がありません。

### 自動吸引停止装置で安心

排液がFULLラインに達すると、フィルターの作用で自動的に吸引が止まります。うっかり止め忘れの心配がありません。

### 排液はライナーごと焼却

ライナーは環境保全を考えて、焼却処理可能な素材を使用しています。ガイドラインに沿って、正しい処理を行ってください。

### 交換・セットがスムーズ



ライナーをキャニスターに差し込みヘッドを閉じればセット完了です。この時ライナーの凸部とホルダーの凹部をしっかりと合わせてください。

### カラーバリエーション



ピーチ

レモン

メント