


搬送中でも異変がすぐにわかる！

アラーム機能付きパルスオキシメータ、
サーフィンPOプラス。

患者さん自身の容体の変化はもちろん、
様々なヒヤリハットが原因で起こることもある、
SpO₂の低下や頻脈・徐脈といった酸素吸入時の異変。
アラーム機能を新たに採用したサーフィンPOプラスならば、
搬送などの際にはどうしても気づきにくなってしまう、
そうした患者さんの思いがけない急変にも
いち早く対応できます。

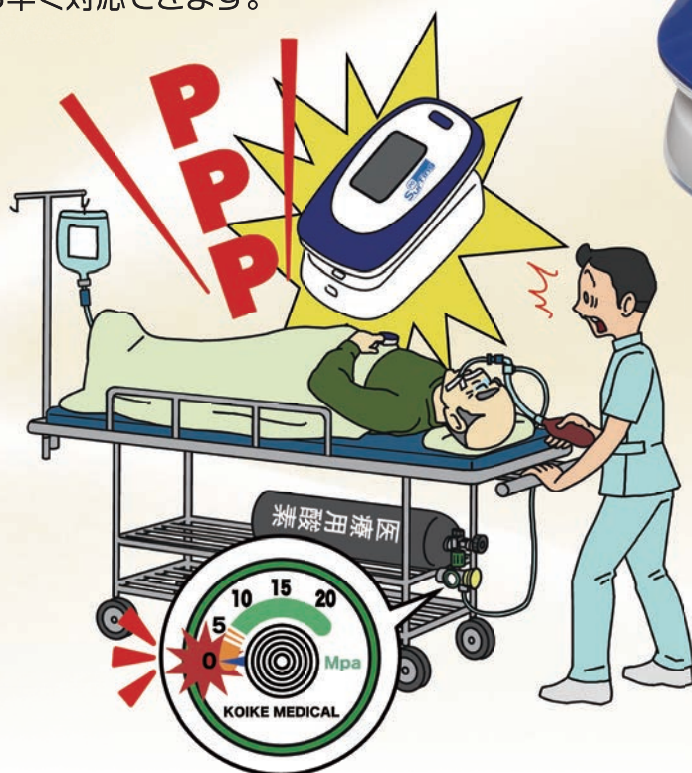

● SpO₂アラーム機能

SpO₂ (経皮的動脈血酸素飽和度) に
異常があるとアラーム音で警告します。

● 脈拍アラーム機能

脈拍に異常があるとアラーム音で警告します。

● 脈拍同期音

脈拍に同期して音が鳴ります。

サーフィンPOプラス

6モード表示切替機能 + アラーム機能

便利な6モード表示切替機能に加え、
SpO₂や脈拍数の異常を知らせるアラーム機能を新たに採用。

患者さんの異変を音で警告する、アラーム機能を新たに採用。

あらかじめ設定した範囲を外れるとアラーム音が鳴る、SpO₂、脈拍それぞれのアラーム機能を新たに採用。酸素吸入している患者さんを搬送する際などに異変を即座に察知できるばかりでなく、酸素ポンプの残量不足や開栓忘れといったヒヤリハット対策にも効果的です。また脈拍同期音を鳴らすこともできます。

より見やすく表示できる、6モード表示切替機能。

軽量・コンパクトなボディに、鮮明なカラーディスプレイを搭載。ボタンを押すだけの簡単操作で6モードの表示切替えが可能です。

お子様にはサーフィンPOミニ

上に向けても見やすい

単4アルカリ電池2本使用

アラームで異常を警告

左右どちらでも見やすい


お医者さんからも見やすい

仕様

一般の名称	パルスオキシメータ	
認証番号	229AKBZX00092000	
販売名	サーフィンPOプラス	
クラス分類	管理医療機器 / 特定保守管理医療機器	
SpO ₂	測定範囲	0～100%
	測定精度	70～100%:±2%
	アラーム設定	上限値 86～99%(出荷時 99%)
		下限値 85～98%(出荷時 85%)
On/Off切替(出荷時 Off)		
脈拍数	測定範囲	30～250bpm
	測定精度	30～250bpm:±2%
	アラーム設定	上限値 31～250bpm(出荷時 120bpm)
		下限値 30～249bpm(出荷時 50bpm)
		On/Off切替(出荷時 Off)
脈拍同期音	On/Off切替(出荷時 Off)	
表示切替	6モード	
輝度調整	5段階	
水に対する保護	IP22	
温度	使用時:10～40℃ 保管時:−40～60℃	
湿度	使用時:75%RH 結露なし	
	保管時:95%RH 結露なし	
電源	単4アルカリ電池2本(連続約20時間使用可能)	
サイズ	高さ32.5×全幅30.5×奥行60mm	
重さ	25g±0.5g(単4電池2本含まず)	

ディスプレイ表示

※表示の数値は一般的な数値を<モード1>で表示しています。

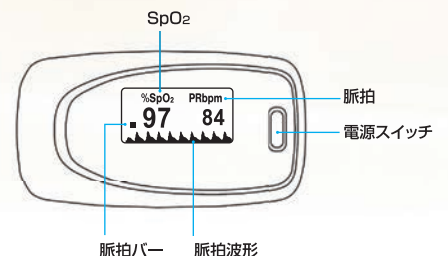

モード1



右手での計測をしやすい

モード2



脈波の波形をラインの波形に変更

モード3



数値を大きく表示

モード4



左手での計測をしやすい

モード5



上向き、縦向きでの計測をしやすい

モード6



対面での計測をしやすい

製造販売元



株式会社 小池メディカル <http://www.koike-medical.co.jp/>

本社: 〒132-0031 東京都江戸川区松島1-24-8 Tel.03-5662-6605 / Fax.03-5662-6606

注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
- 製品の定格およびデザインは、改善等のため予告なく変更する場合があります。
- このカタログの記載内容は、2018年4月現在のものです。

●お問い合わせは