

■仕様

一般的名称	真空吸引器
販売名	ヨックスGL S-511
届出番号	10B2X00014C00010
入口吸引圧力	-60~-80kPa
吸引圧力調整範囲	0~-60kPa
吸引圧力調整目盛	OFF,-5,-10,-15,-20,-25,-30,-35,-40,-45,-50,-60 (kPa)
ボトル内容積	1,200ml
セット内容	ネオ・コントローラー、ボトルヘッド、 ボトルホルダー、プラスチックボトル、 ペイシェントホース（ホースさし付）
ボトルの種類	プラスチックボトル
全装備重量	1,070g
セット外観寸法	幅136×奥行185×高さ334 (mm)
ボトル単体の重量	230g
ボトルの寸法	最大外形φ112×高さ232 (mm)
アダプター	ピンインデックス形

●特定保守管理医療機器 ●一般医療機器

■カラーバリエーション



■オプション



※アダプターは、アウトレットバルブの形式に合ったアダプターを選定してください。



片手で操作、ゲージレス吸引器

**注意** 正しく安全にお使いいただくために、  
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは、改善等の為予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせは

# yoex S-511 GL



ライトピンク

グレイッシュピンク

※患者用ホースハンガーはオプションです。

## ワンタッチ脱着、ワンタッチ開閉

- グリップを握り、親指でカラーボタン／ホワイトボタンを押すだけで、脱着・開閉が可能です。
- ボタンも大きくなり、操作性が向上。ボタンに動作も明示し、操作間違い防ぎます。



## ゲージレスで簡単に吸引圧設定

- 片手で必要な目盛に合わせるだけで、ホースを閉塞することなく吸引圧を設定可能です。
- 最大吸引圧は -60kPaまで。より強い吸引圧を設定すること※が可能になりました。
- 非磁性体部品採用 ※但し、配管圧が-60kPa以上の場合



## 吸引した排液をしっかりと目隠し

- 患者、その家族に吸引した排液を意識させないボトルカバー。排液をしっかりと確認したいときは、取り外しもできます。
- ユーザーオリジナルデザインのカバーも取り付け可能です。



## 安心の自動停止・アラーム警報

- フロートの作用で排液が FULL LEVEL を越えると、アラームでお知らせして吸引を自動的に停止させます。排液も静かに流れ落ちます。

