

液体窒素を噴射し凍結治療  
非接触な治療が可能  
豊富なアクセサリー

MM株式会社  
niic エムエムアンドニーク



汎用冷凍手術ユニット  
クライオプロ

# CryoPro

クライオプロは、液体窒素をボトル内に充填し、  
噴霧することでイボなどを凍結治療する装置です。

# 汎用冷凍手術ユニット クライオプロ CryoPro



## 用途に合わせたスプレイアパーチャーが標準付属

標準セットには噴射口径の異なる4種類のスプレイと角度のついたベントスプレイの全5種類が含まれており、これらを付け替えることで患部の大きさや部位にあわせた治療が可能です。



Aスプレイ




1mm径のスプレイ  
深く広範囲の皮膚に適用

Bスプレイ




0.75mm径のスプレイ  
やや広範囲の皮膚に適用

Cスプレイ

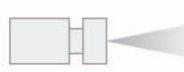

0.55mm径のスプレイ  
疣等に適用

Dスプレイ

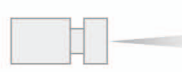

0.45mm径のスプレイ  
小さな疣等に適用

ベントスプレイ



0.55mm径、長さ8.4cm  
のところで角度のついたスプレイ  
通常では治療が困難な部位に適用  
(ガスが空気中に拡散するのを避けます)

## オプション品の紹介

オプション品として、患部を定めた範囲で凍結させるためのレキサンディスクがあります。

レキサンディスクは円錐形のくぼみが4つあるプレートで、くぼみの頂点にそれぞれ3mm、5mm、8mm、10mmの直径の穴が開いています。

液体窒素を噴射する際にレキサンディスクでマスキングすることで、目的の部位以外に液体窒素が当たることを防ぎます。



レキサンディスク使用イメージ



クライオプロの実際の患部への使用イメージについては、こちらのメーカー提供動画をご覧ください。



開梱方法、液体窒素の充填・スプレイの付け替え、普段のメンテナンスについては当社HPをご覧ください。

## 仕様

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 販売名   | クライオプロ                    |
| 内容量   | マックス (500ml)、ミニ (350ml)   |
| 一般的名称 | 汎用冷凍手術ユニット(11067000)      |
| 分類    | 高度管理医療機器(クラスⅢ)、特定保守管理医療機器 |
| 承認番号  | 22600BZX00522000          |
| 製造元   | CORTEX TECHNOLOGY(デンマーク)  |

※仕様は予告なく変更させて頂くことがございます。あらかじめご了承ください。

製造販売元 ディーマー・メディカル・ジャパン株式会社 東京都中央区日本橋小伝馬町14番7号

## 株式会社エムエムアンドニーク

総販売元

本社 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-16-6

東京支店 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-16-6

札幌営業所 〒063-0032 北海道札幌市西区西野2条2丁目5-18-3F

名古屋支店 〒465-0014 愛知県名古屋市中東区上菅2-1108-3F

大阪支店 〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国1-32-9-3F

福岡支店 〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代4-29-27-5F

TEL:03-3865-6575 FAX:03-3865-6585

TEL:03-3865-6572 FAX:03-3865-6594

TEL:011-668-5176 FAX:011-668-5177

TEL:052-775-4103 FAX:052-775-1493

TEL:06-6399-3224 FAX:06-6399-3235

TEL:092-632-0393 FAX:092-632-0397